

## 「視線」で伝の心进行操作。(別売オプション) **NEW!**

### スキャン動作やマウス操作を、視線で操作。

メニュー操作や文字入力では、スキャン動作を待つ必要が無く、Windows 操作では、マウスカーソル移動時の待ち時間を視線入力により、軽減します。

### 視線で移動して、注視で決定します。

目的の箇所へ視線を動かし、注視することで、マウスクリック操作が行えます。

### 視線入力でもスイッチ操作でも同じ操作画面

メニューや文字盤等、視線入力でもスイッチ操作でも変わらない操作画面で操作できます。

### 視線入力とスイッチを併用できます。

視線で移動して、スイッチで決定することもできます。

- 視線入力には、別途適合した視線入力装置が必要となります。(修理基準対応品)
- 画面は開発中のものです。



### 伝の心機能

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 文 字 盤        | 54ポイント/38ポイント/23ポイント表示、スキャン方向反転、文字列選択/切り取り/コピー/貼り付け、一発メール送信             |
| ス キ ャ ン      | スキャン速度(0.4~8.0秒)、音(オン/オフ)                                               |
| 文 書          | 編集域文字表示(10~40ポイント)、保存/読み出し(並び替え、プレビュー)、印刷(プレビュー、見本表示)                   |
| 日 常 使 用 文    | 階層パネル形式(最上位パネル数:3 各パネルに最大15件の文または下位パネル呼び出し用ボタンを登録することができます。)            |
| 定 型 句        | 自動絞り込み入力、1定型句:40文字、読み:40文字、最大登録数:3,000句(500句登録済み)                       |
| 音 声          | 全文/未確定文字列の発声(標準仕様:男性声/女性声)                                              |
| リモコン機能       | テレビ                                                                     |
|              | ビデオ                                                                     |
|              | その他の機器                                                                  |
| 電子メール機能※1    | メールの送受信(自動受信あり)、返信、画像形式添付ファイルの受信/表示、アドレス帳の編集、下書き、あて先(To/CC/BCC)、複数アカウント |
| ホームページ閲覧機能※1 | お気に入り操作、マウス操作、検索文字列の入力、アドレス入力、画面拡大、タブ切り替え                               |
| ウィンドウ操作機能    | デスクトップアイコンのスキャン、ウィンドウ操作、ウィンドウ切り替え、文字盤入力、マウス操作、LINE操作※1※2                |
| 評価OS環境       | ノート型:Windows® 10、パネル型:Windows® 10                                       |
| 評価日本語入力システム  | Microsoft® IME                                                          |

※1 メール、ホームページ閲覧、LINE には、別途ユーザー様によるインターネット回線の準備、設定が必要になります。 ※2 LINE を使用するには、電話番号と設定が必要になります。

・Microsoft、Windows 10、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
・その他記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

●「伝の心」の開発にあたり、財団法人テクノエイド協会、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の助成金を受けました。また、北里大学東病院、横浜市総合リハビリテーションセンター、日本ALS協会のご協力をいただきました。



### 使用上のご注意

- 本体装置はナースコールなど、生命維持に関わる用途には使用できません。
- 本体装置は電波の状態により、携帯電話・PHS送信ができない場合があります。このため生命維持に関わる用途には使用できません。
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■URL: <http://www.hke.jp/products/dennosin/denindex.htm>

- 製品仕様は、2018年9月現在のもので改良のため変更することがあります。
- 本装置は国内のみでご使用いただけます。(For Japanese Domestic Use Only)
- 画面はハメ込み合成です。

くお問い合わせ、ご用命は...下記、正規販売代理店か、販売取扱店へご相談ください

正規販売代理店  
〒273-0005 千葉県船橋市本町4-38-28-613  
株式会社みどりのまきば企画  
代表取締役 玉 浦 正 憲  
携 帯 080-6715-7773

製造元: 株式会社 日立ケーイーシステムズ

© Hitachi KE Systems, Ltd. 2010,2018 All Rights Reserved.

販売取扱店

KEC130010E

2018年9月現在 Rev. 02. 50

## 重度障害者用意思伝達装置「伝の心」

本装置は厚生労働省の補装具費支給対象品です。

**HITACHI**  
Inspire the Next



誰かと話してみませんか、伝の心で。



パネル型



ノート型

## 文字を入力してあなたの意思を伝えることができます。

### 目的の文字の上にカーソルがきたら、身体の一部を動かして文字を入力します。

文字盤の上をカーソルが動いています。カーソルが目的の文字にきたときに、身体の一部を動かします。すると、その文字が入力されます。

### 「ね」を入力する場合



カーソルが「な列」にきたら身体を動かしてください。




カーソルが「な行」を移動するので、「ね」にきたら身体を動かしてください。

### 伝の心の仕組み

身体の一部をわずかに動かして、センサー・スイッチを操作し、文字盤を用いて文章を作成できるほか、テレビなどのリモコン操作が可能になります。



「ね」の入力できました。

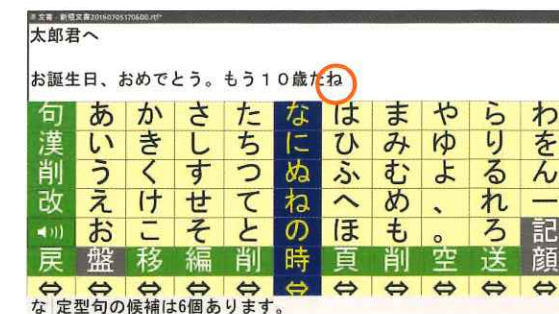

作成した文章を音声で読み上げることができます。

※予め収録したご自身の声で読み上げる「AITalk®伝の心用あなたの声」を別売オプションでご用意しております。詳しくは、販売店へご相談ください。



## もっと簡単に気持ちを伝えることができます。

### 日常的に使う文章を選択することで、スピーディーに意思伝達ができます。


日常使用文は3つのジャンルから目的に合わせて選ぶことができます。日常使用文の各項目から、さらに日常使用文の一覧画面を呼び出すこともでき、たくさんの日常使用文を登録できます。

●日常使用文の登録は介護の方が行います。



### 定型句を表示し、入力時間の手間を省きます。

文字を入力し、文字盤の「句」を選択すると、その文字から始まるいくつかの定型句を表示。定型句の表示は使用頻度の多いものから順に表示しますので、選択がさらに容易になります。

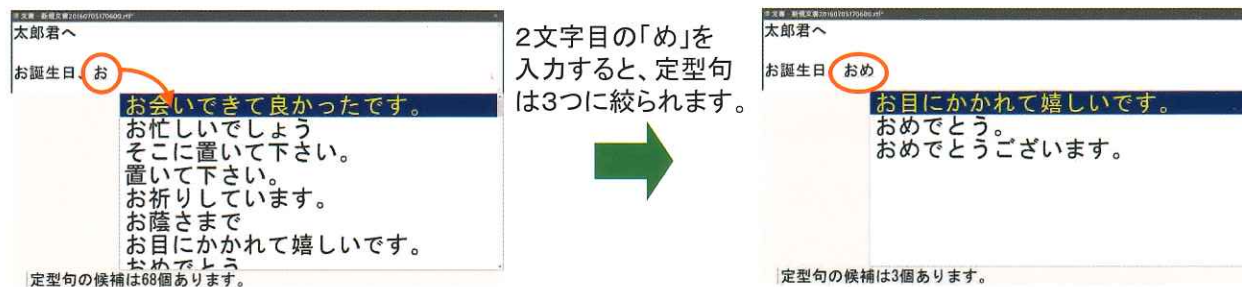

●定型句の登録はご自身でも介護の方でも行えます。

## 人とのつながりを広げる使い方ができます。

### 遠くにいる人に文章を送れるメール

遠方の家族や友人ともコミュニケーションを図れるようメール機能を搭載。メールの返信はもちろん、送られてきたメールのアドレスはそのままアドレス帳に登録できます。

### 携帯電話へのメール送信


携帯電話へメールを送ることができるため、介護の方が外出中でも連絡をとることができます。

### かんたんラクラク「一発メール送信」

文書作成画面(文字盤)から、そのまま文章をメール送信できます。複数のメールアドレスを登録でき、頻繁に連絡を取り合う相手とのやりとりに便利です。

### 「LINE」に対応

人とのつながりをメールだけでなく、LINE にも広げました。ご家族やお友達のスマホへはもちろん、伝の心同士でもメッセージを送りあうことができます。

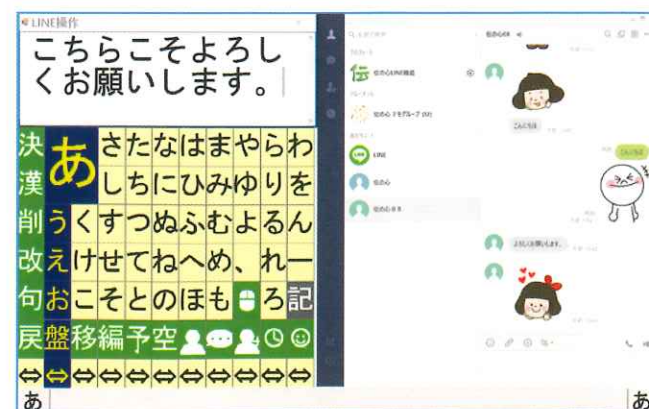

## 身の周りの機器を操作することができます。

### 学習リモコンでさまざまな機器を操作。

伝の心のリモコン機能「学習リモコン」はテレビ・レコーダーの操作が可能。それ以外の赤外線リモコン対応機器は、学習リモコンに赤外線リモコン信号を登録すると操作できるようになります。

●お使いの機器によっては学習リモコンに赤外線信号を登録できないことがあります。

## もっと安心してお使いいただける機能を用意しています。

### 家の中での呼び出し

伝の心の操作メニューに表示される「呼音」を選択するとブザー音が鳴ります。家の中で離れた場所にいる介護の方を呼びたいときなどに便利です。

### センサーアラート

入力用センサーを監視していますので、ケーブルが伝の心本体から外れたとき、あるいはセンサーのオン状態が続いた場合には警告音が鳴ります。

## 「伝の心」の基本構成

### ノート型とパネル型からお選びいただけます。(※パネル型には、光学ドライブ、キーボードはございません。)

ご利用者の様々な使用環境にお応えするために、据え置き型で大きな文字表示をするノート型(画面サイズ:15.6 型)、薄型・軽量で持ち運びがしやすいパネル型(画面サイズ:10.1 型)をご用意しています。



### センサーの一例(別売品) (販売会社取扱)

#### タッチセンサー(チャイム付き)



#### PPPSスイッチ



#### エアバッグセンサー/ピエゾセンサー



●他にも各種センサー、スイッチを用意しています。

### 「なんでもワイヤレス」で、配線をすっきりと。(別売オプション)

「伝の心」と「なんでもワイヤレス」をケーブルで接続しないので、活動範囲が広がります。

●「スイッチ接続BOX」と入れ替えての使用になります。

#### なんでもワイヤレス



「重度障害者用意思伝達装置」は補装具費支給対象品です。本体装置と販売会社取り扱いセンサーなどの付属品を合わせた価格の原則として、1割負担でご購入いただけます。詳しくは、お客さまがお住まいの地方自治体窓口にてお問い合わせください。本体装置の希望小売価格は45万円(非課税)です。センサーなどの価格は、その種類により異なります。このほかに設置費用が別途かかる場合があります。